

DDN Surf

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE
POUR LA DÉCONTAMINATION DES SOLS ET DES
SURFACES

DÉCONTAMINATION DE LA RADIOACTIVITÉ



SOLS ET SURFACES



■ DOMAINE D'APPLICATION

- Médecine nucléaire

■ AVANTAGES PRODUIT

- Solution à pH neutre
- Sans CMR *
- Large spectre antimicrobien
- Compatibilité avec un large panel de matériaux
- Enregistrement biocide : TP 02 (n° inventaire : 32082)
- Décontamination de la radioactivité

** Cancérogènes, Mutagènes,
toxiques pour la Reproduction*



www.franklab.com

Fb Franklab
notre expertise l'Ultra-Propreté



10%

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE POUR LA DÉCONTAMINATION DES SOLS ET DES SURFACES

■ MODE D'EMPLOI

■ Préparation de la solution de bionettoyage :

- Porter des gants, des lunettes et un tablier
- Diluer 500 ml de DDN Surf pour 5 litres (10%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution

■ Utilisation :

- 1- Nettoyer le sol ou la surface ou le matériel médical, à l'aide d'un balai ou une lingette
- 2- Temps de contact : 5 minutes minimum
- 3- Rincer à l'eau
- 4- Laisser sécher
- 5- Vérifier le niveau de contamination résiduel

Renouveler le bain pour chaque utilisation.

Les solutions de décontamination doivent être récupérées et stockées dans des cuves ou containers spécialement affectés à cet usage.

■ PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727 + A1	0,25%	5 minutes
	EN 1276 / EN 13697	1%	5 minutes
Levuricide	EN 13624	0,25%	5 minutes
	EN 1650	0,5%	5 minutes
	EN 13697	1%	5 minutes
Fongicide	EN 13697	2%	10 minutes
	EN 1650	2%	15 minutes
Virucidie	EN 14476 PRV (virus modèle de l'hépatite B)	0,25%	1 minute
	EN 14476 + A1 HIV	0,25%	15 minutes
Sporicide	EN 13704 C.difficile	1%	15 minutes

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS 010760)

■ CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **Vert**
- pH à 0,25% : **6,4**
- pH à 2% : **7,0**
- pH à 10% : **7,0**
- Pérémpion : **3 ans**

■ CONDITIONNEMENTS

- ① Carton de 250 doses de 20mlréf. **1076042**
- ② Carton de 12 bidons de 1 Lréf. **1076016**
- ③ Carton de 4 bidons de 5 Lréf. **1076020**

■ COMPOSITION

- Agents tensioactifs non ioniques
- Agents séquestrants
- Ammonium quaternaire
- Huile essentielle de menthe



Produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.