

LUBRIX *Spray*

LUBRIFIANT À BASE D'HUILE DE PARAFFINE POUR INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

INSTRUMENTATION CHIRURGICALE



■ AVANTAGES PRODUIT

- Lubrification manuelle des instruments chirurgicaux articulés
- Efficace pour éviter les traces noirâtres et les marbrures qui proviennent d'une eau de qualité insuffisante.
- Brillance des surfaces traitées
- Garantie d'un entretien facile et précis des instruments



LUBRIX *Spray*

LUBRIFIANT À BASE D'HUILE DE PARAFFINE POUR INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

■ MODE D'EMPLOI

■ 1ère utilisation :

- Porter des gants et des lunettes
- Placer l'embout sur le bec de l'aérosol

■ Utilisation :

- 1- Agiter l'aérosol avant emploi
- 2- Tenir l'aérosol verticalement et pulvériser de manière ciblée sur les articulations des instruments par brèves pressions
- 3- Actionner les articulations plusieurs fois pour une bonne répartition du produit
- 4- Essuyer avec une lingette sèche

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS 010328)

■ CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide** ■ Couleur : **Incolore**
- pH : **6,5**
- Conservation après ouverture : **2 ans**

■ COMPOSITION

- Huile de paraffine purifiée
- Emulsifiant
- Gaz propulseur : azote

■ CONDITIONNEMENT

- ① Carton de 4 aérosol de 400 ml.....réf. **1032856**



Produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.