

RINCE L7

ADDITIF DE RINÇAGE ET
ACTIVATEUR DE SÉCHAGE

INSTRUMENTATION CHIRURGICALE



AUTOLAVEUR



AVANTAGES ET QUALITÉS

- pH neutre
- Sans silicone
- Additif à l'eau de rinçage final des Laveurs Désinfecteurs d'Instruments (LDI) afin d'activer le séchage
- Disparition rapide des traces d'humidité sur les instruments qui sont immédiatement secs et prêts à être stérilisés
- Apporte un aspect brillant aux instruments et améliore l'état des articulations

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



CE



RINCE L7

ADDITIF DE RINÇAGE ET ACTIVATEUR DE SÉCHAGE

■ MODE D'EMPLOI

■ Réglage de la phase de rinçage final du cycle du LDI :

- Concentration préconisée :0,1%
- Température préconisée :93°C
- Temps de contact préconisé :3 minutes

L'opération de rinçage final s'effectue à 93°C afin d'assurer une désinfection thermique.

■ Produits à associer lors du cycle :

■ Phase de lavage :

- TFD Premium (FT 1730.B) :détergent inactivant des prions et amyloïdique
- ENZYMEX L7 (FT 790.B) :détergent enzymatique neutre
- C-PRO 2 (FT 110.B) :détergent peu alcalin
- TFD 7 (FT 020.B) :détergent alcalin

■ Rinçage intermédiaire :

- PHOSPHAX (FT 050.B) :neutralisant acide

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS010329)

■ CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **jaune orangé**
- pH à 0,1% : **6,9**
- Péréemption : **2 ans**

■ COMPOSITION

- Agents tensioactifs non ioniques
- Agents activateurs de séchage
- Agents séquestrants

■ CONDITIONNEMENTS

- ① Carton de 4 bidons de 5 Lréf. **1032920**
- ② Carton de 2 bidons de 10 Lréf. **1032922**
Carton de 3 bidons bas de 5 Lréf. **1032915**



Dispositif médical de Classe 1.